

Uživatelská příručka pro nájezdovou hliníkovou rampu

Nájezdové rampy s **maximální nosností 272 kg** jsou určeny pro transport vozítek, vozíků, invalidních vozíků. Lze použít i váhově a rozměrově podobných dopravních prostředků. Rampy nesmějí být použity do větší než maximální nájezdové výšky uvedené v tabulce níže! Produkt nesmí být používán osobami pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek!

Neuposlechnutí bezpečnostních pokynů může vést k sesunutí ramp z plochy pro najíždění a tím k poškození transportovaného přepravního prostředku, nájezdových ramp, zranění osob, případně k jejich usmrcení!

Maximální doporučená výška nájezdu pro zatížený/nezatížený dopravní prostředek

Číslo produktu	Délka rampy	Maximální nájezdová výška rampy PŘI PLNÉM ZATÍŽENÍ rampy	Běžná nájezdová výška NEZATÍŽENÉ rampy
WR013FT	90 cm (3')	15 cm	22 cm
WR014FT	120 cm (4')	20 cm	30 cm
WR015FT	150 cm (5')	25 cm	38 cm
WR016FT	180 cm (6')	30 cm	45 cm

DBEJTE VŽDY BEZPEČNOSTNÍCH INSTRUKCÍ UVEDENÝCH NA ŠTÍTCÍCH RAMP!

Varování

1. **NEPŘEKRAČUJTE** maximální nosnost pro nájezdové rampy.
2. **NEPŘEKRAČUJTE** maximální nájezdovou výšku pro danou nájezdovou rampu.
3. Při manipulaci a používání produktu dbejte zvýšené opatrnosti a vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.
4. Produkt používejte vždy na zpevněném a rovném (odstupňovaném) povrchu.
5. Rampy nikdy nenechávejte volně bez dohledu v případech, že nejsou zabezpečeny.
6. Po použití rampu složte, zajistěte kolíkem a uložte zpět na bezpečné a suché místo.
7. Zabraňte přístupu nepovolaným a neproškoleným osobám, dětem a zvířatům.
8. Udržujte povrch ramp suchý a beze stop olejů a tuků. V ostatních případech, kdy je povrch kluzký, dbejte zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození majetku.
9. Rampy používejte v souladu s pokyny výrobce invalidních vozíků.

Instalace a zabezpečení

Rampu před instalací a používáním pečlivě prohlédněte. Proveďte kontrolu produktu, jednotlivých spojů a styčných ploch rampy. V případě, že se na rampě vyskytne jev (ohnutí, prasklina nebo jiné poškození), který jste nepozorovali při koupi, rampu nepoužívejte a kontaktujte prodejce. Rampu během prohlídky rozevřete, zkontrolujte její pevnost a funkčnost kloubových spojů. Rampu následně umístěte na vybrané očištěné rovné (odstupňované) místo se zpevněným povrchem tak, aby se rampa nesmekla a ložné plochy byly po celé své délce a šířce v kontaktu s podkladem.

Používání

1. Najíždění vozíku na rampu

Vozík přistavte před rampu přední částí a předními koly ve směru nájezdu na rampu. Vozíkem najedte na rampu a po rampě se pohybujte nízkou a konstantní rychlostí. Po rampě se s vozíkem pohybujte konstantní rychlostí a kontrolujte, že jsou kola ve směru jízdy, nesmýkají se po rampě a nezasekávají se o boční vedení ramp.

Dbejte zvýšené opatrnosti v případech, kdy je povrch ramp mokrá! Povrch ramp je následně kluzký a hrozí nebezpečí poranění a poškození ramp. V takových případech doporučujeme asistenci minimálně jedné osoby při používání rampy.

2. Sjíždění vozíku z rampy

Vozík přistavte před rampu přední částí a předními koly ve směru sjezdu z rampy. Vozíkem pomalu sjíždějte dolů po rampě a ujistěte se, že se kolečka posouvají rovnoměrně. Vozíkem najedte na rampu nízkou a konstantní rychlostí. Po rampě se s vozíkem pohybujte konstantní rychlostí, plynule brzděte a kontrolujte, že jsou kola ve směru jízdy, nesmýkají se po rampě a nezasekávají se o boční vedení ramp. Při sjíždění z rampy doporučujeme asistenci minimálně jedné osoby.

Údržba

Uživatel je zodpovědný za bezpečné použití rampy. Rampu pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem a kloubové spoje promazávejte malou dávkou oleje s nízkou viskozitou. Před každým použitím ramp proveďte vizuální kontrolu produktu, jednotlivých spojů a styčných ploch rampy. V případě, že se na rampě vyskytne jev (ohnutí, prasklina nebo jiné poškození), který jste nepozorovali při koupi, rampu nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

VŽDY DODRŽUJTE MAXIMÁLNÍ POVOLENOU NOSNOST RAMP. NEDODRŽENÍ POKYNŮ ČINÍTE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Selhání způsobená nedodržením manuálu mohou vést k poškození vozítka, ramp, zranění osob, případně jejich smrti.

Prodejce není zodpovědný za nesprávné použití nebo škody způsobené během používání.